

## EIA Treponema pallidum TOTAL

**EAN-Code:** 8595635303104

**Katalognummer:** Tp0096

**Verpackungsgröße:** 96 tests

**Lagerung:** 2-8 °C

**Hersteller:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



### Beschreibung:

- Mikrotiter-Wells sind mit den spezifischen Antigenen von Treponema pallidum, insbesondere p17, p47, p41 und p15, beschichtet.
- Falls vorhanden, binden sich spezifische Antikörper an das Antigen. Der Komplex wird mit Konjugat markiert und durch eine Farbreaktion mit Substrat (TMB-Complete) nachgewiesen.
- Das Kit ermöglicht 96 Tests (einschließlich Kontrollen und Kalibratoren) in einer Mikrotiterplatte, die aus farbcodierten Streifen und abbrechbaren Vertiefungen besteht.

### Vorteile:

- Gesamttestdauer: ca. 1 Std 15 Min.
- Hohe Sensitivität und Spezifität.
- Semiquantitative Auswertung anhand des Positivitätsindex (IP)
- Farbige Reagenzien für einfaches Pipettieren.
- Gebrauchsfertige, farbcodierte Komponenten.
- Einkomponenten-Substrat.
- Austauschbare Komponenten mit Ausnahme von Kit-spezifischen Komponenten (Kontrollen, Konjugat, Platte).

### Anwendung:

- Qualitative test for detection of antibodies against *Treponema pallidum*.

**Assay-Schnellverfahren:**

1. Proben werden unverdünnt verwendet.
2. Kontrollen und verdünnte Proben pipettieren.
3. Konjugieren hinzufügen.
4. 30 Minuten bei 37 °C inkubieren.
5. Vertiefungen absaugen und 5 Mal waschen.
6. Substrat hinzugeben (TMB-Complete).
7. 30 Minuten bei 37 °C inkubieren.
8. Stopplösung (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) hinzugeben.
9. Photometrisch bei 450 nm ablesen.
10. Ergebnisse auswerten.