

## INDOXYLstrip



**EAN-Code:** 8595635303395

**Katalognummer:** Is0100

**Verpackungsgröße:** 100 tests

**Lagerung:** 2-8 °C

**Hersteller:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

### Beschreibung:

- INDOXYLstrip ist ein Test zum Nachweis der Acetat-Esterase-Aktivität von Mikroorganismen. Der Test basiert auf der Reaktion freier Indoxylgruppen mit Sauerstoff, die zu einer Farbänderung führt. Acetat-Esterase-Aktivität ist vorhanden z.B. in *Campylobacter* spp. und in *Branhamella catarrhalis*. Der Test eignet sich für Screening-Untersuchungen und zur Identifizierung verdächtiger mikrobieller Kolonien.
- Haltbarkeit: 24 Monate.

### Anwendung:

- Mikrobiologischer Diagnosetest zum schnellen Nachweis der Acetatesterase-Aktivität von *Moraxella* (*Branhamella*) *catarrhalis* und anderen Mikroorganismen.

### Assay-Schnellverfahren:

1. Wischen Sie nach dem Wachstum von 18-24 h mehrere Bakterienkolonien von einer Petrischale mit der aktiven Papierzone des Diagnosestreifens ab.
2. Lesen Sie das Ergebnis nach 3-5 Minuten ab.
3. Ergebnisse auswerten