

INDOXYLstrip



EAN-Code: 8595635303395

Katalognummer: Is0100

Verpackungsgröße: 100 tests

Lagerung: 2-8 °C

Hersteller: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Beschreibung:

- INDOXYLstrip ist ein Test zum Nachweis der Acetat-Esterase-Aktivität von Mikroorganismen. Der Test basiert auf der Reaktion freier Indoxylgruppen mit Sauerstoff, die zu einer Farbänderung führt. Acetat-Esterase-Aktivität ist vorhanden z.B. in *Campylobacter* spp. und in *Branhamella catarrhalis*. Der Test eignet sich für Screening-Untersuchungen und zur Identifizierung verdächtiger mikrobieller Kolonien.
- Haltbarkeit: 24 Monate.

Anwendung:

- Mikrobiologischer Diagnosetest zum schnellen Nachweis der Acetatesterase-Aktivität von *Moraxella* (*Branhamella*) *catarrhalis* und anderen Mikroorganismen.

Assay-Schnellverfahren:

1. Wischen Sie nach dem Wachstum von 18-24 h mehrere Bakterienkolonien von einer Petrischale mit der aktiven Papierzone des Diagnosestreifens ab.
2. Lesen Sie das Ergebnis nach 3-5 Minuten ab.
3. Ergebnisse auswerten