

TRIBUstrip



EAN-Code: 8595635303593

Katalognummer: Ts0300

Verpackungsgröße: 300 tests

Lagerung: 2-8 °C

Hersteller: TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.

Beschreibung:

- Das Testprinzip ist eine enzymatische Hydrolyse von Tributyrin. Diese Reaktion verursacht eine Farbänderung des sauren basischen Indikators.
- Das Kit ermöglicht 300 Stk.
- Haltbarkeit: 24 Monate.

Anwendung:

- Mikrobiologischer Diagnosetest zur Unterscheidung zwischen Moraxella (Branhamella) und der Gattung Neisseria.

Assay-Schnellverfahren:

1. Werfen Sie einen Tributyrin-Streifen in die Suspension des getesteten Stamms in 1 ml gepufferter Kochsalzlösung.
2. Inkubieren Sie die getestete Probe bei 37 °C (ohne CO₂).
3. Lesen Sie die endgültigen Ergebnisse nach 18-20 h.
4. Ergebnisse auswerten