

## VHSV Ag ELISA

**EAN-Code:** 8595635303111

**Katalognummer:** VHS096

**Verpackungsgröße:** 96 tests

**Lagerung:** 2-8 °C

**Hersteller:** TestLine Clinical Diagnostics s.r.o.



### Beschreibung:

- Mikrotiter-Wells sind mit spezifischen Antikörpern gegen das VHS-Virus beschichtet..
- Falls vorhanden, binden sich spezifische Antikörper an das Antigen. Der Komplex wird mit Konjugat markiert und durch eine Farbreaktion mit Substrat (TMB-Complete) nachgewiesen.
- Das Kit ermöglicht 96 Tests (einschließlich Kontrollen und Kalibratoren) in einer Mikrotiterplatte, die aus farbcodierten Streifen und abbrechbaren Vertiefungen besteht.
- Die Assay-Sensitivität (103 TCID50 / 0,1 ml der untersuchten Flüssigkeit) ist ausreichend für die routinemäßige Untersuchung von Feldproben.

### Vorteile:

- Gesamttestdauer: ca. 4 Std.
- Hohe Sensitivität und Spezifität.
- Farbige Reagenzien für einfaches Pipettieren.
- Gebrauchsfertige, farbcodierte Komponenten.
- Einkomponenten-Substrat.
- Austauschbare Komponenten mit Ausnahme von Kit-spezifischen Komponenten (Kontrollen, Konjugat, Platte).
- Geprüft vom Veterinärforschungsinstitut Brünn, Tschechische Republik und den Staatlichen Veterinärinstituten der Tschechischen Republik.

- Zugelassen vom Institut für staatliche Kontrolle von Veterinärbiologien und -arzneimitteln, Tschechische Republik.

#### **Anwendung:**

- Nachweis von VHSV in Organhomogenaten und in den Medien infizierter Zellkulturen.
- Diagnose der Infektion.
- Fischkontrolle vor dem Transport.
- Kontrolle von unter Quarantäne gestelltem Fisch (Export, Import).

#### **Assay-Schnellverfahren:**

1. Verdünnung von Serumproben und Kontrollseren:
  - a. Suchtest: 1+1 - verdünnen Sie die Proben direkt in den Vertiefungen.
  - b. Titrationstest: 1+1 bis 1+255 - verdünnen Sie die Proben direkt in den Vertiefungen.
2. 60 Minuten bei 37°C inkubieren.
3. Vertiefungen absaugen und 3 Mal waschen.
4. Fügen Sie Kaninchen-Antikörper zu VHSV hinzu.
5. 60 Minuten bei 37°C inkubieren.
6. Vertiefungen absaugen und 3 Mal waschen.
7. Konjugat hinzugeben.
8. 60 Minuten bei 37°C inkubieren.
9. Vertiefungen absaugen und 3 Mal waschen.
10. Substrat hinzugeben (TMB-Complete).
11. 10 Minuten bei Raumtemperatur inkubieren .
12. Stopplösung (H<sub>2</sub>SO<sub>4</sub>) hinzugeben.
13. Photometrisch bei 450 nm ablesen.
14. Ergebnisse auswerten.